


PROCEDURA D'INSERIMENTO BIBLIOTECHE

Impianti BREDENT DWOS

1. Aprire Dental Wings e cliccare su “Impostazioni”:

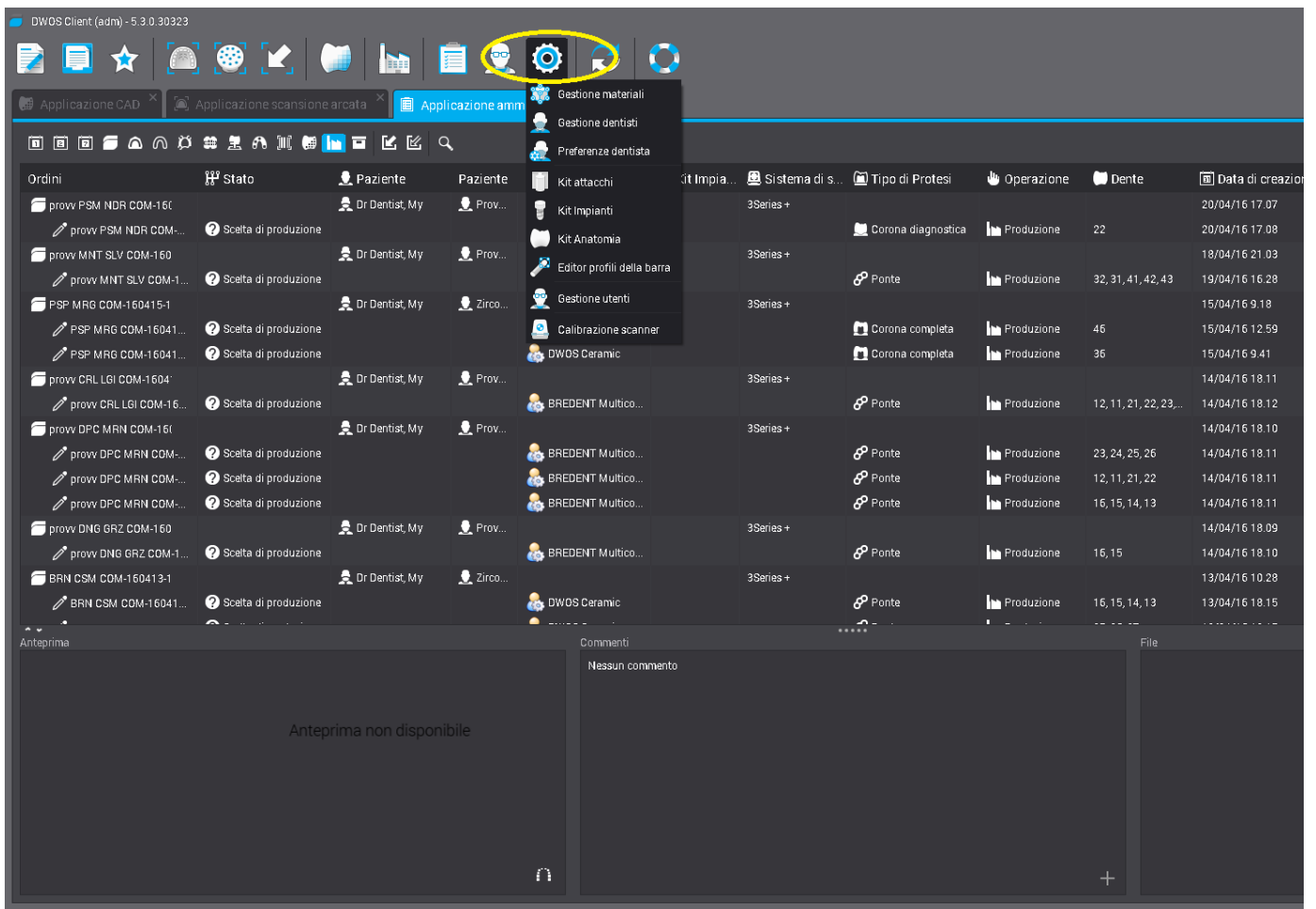

2. Cliccare su “KIT IMPIANTI”:

DWOS Client (adm) - 5.3.0.30323

Applicazione CAD Applicazione scansione arcata Applicazione amministrativa

Gestione materiali
Gestione dentisti
Preferenze dentista
Kit attacchi
Kit Impianti
Kit Anatomia
Editor profili della barra
Gestione utenti
Calibrazione scanner
DWOS Ceramic

Ordini	Stato	Paziente	Paziente	Kit Impia...	Sistema di s...	Tipo di Protesi	Operazione	Dente	Data di creaz
prov PSM NDR COM-160	?	Dr Dentist, My	Prov...	Kit Impianti	3Series +	Corona diagnostica	Produzione	22	20/04/16 17.07
prov PSM NDR COM-160	?	Dr Dentist, My	Prov...	Kit Impianti	3Series +	Corona diagnostica	Produzione	22	20/04/16 17.08
prov MNT SLV COM-160	?	Dr Dentist, My	Prov...	Kit Impianti	3Series +	Ponte	Produzione	32, 31, 41, 42, 43	18/04/16 21.03
prov MNT SLV COM-160	?	Dr Dentist, My	Prov...	Kit Impianti	3Series +	Ponte	Produzione	32, 31, 41, 42, 43	19/04/16 16.28
PSP MRG COM-160415-1	?	Dr Dentist, My	Zirco...	Kit Impianti	3Series +	Corona completa	Produzione	46	15/04/16 9.18
PSP MRG COM-160415-1	?	Dr Dentist, My	Zirco...	Kit Impianti	3Series +	Corona completa	Produzione	36	15/04/16 12.59
prov CRL LGI COM-1604	?	Dr Dentist, My	Prov...	Kit Impianti	3Series +	Corona completa	Produzione	36	15/04/16 9.41
prov CRL LGI COM-1604	?	Dr Dentist, My	Prov...	Kit Impianti	3Series +	Corona completa	Produzione	36	15/04/16 9.41
prov DPC MRN COM-160	?	Dr Dentist, My	Prov...	Kit Impianti	3Series +	Ponte	Produzione	12, 11, 21, 22, 23,...	14/04/16 18.11
prov DPC MRN COM-160	?	Dr Dentist, My	Prov...	Kit Impianti	3Series +	Ponte	Produzione	12, 11, 21, 22, 23,...	14/04/16 18.12
prov DPC MRN COM-160	?	Dr Dentist, My	Prov...	Kit Impianti	3Series +	Ponte	Produzione	23, 24, 25, 26	14/04/16 18.10
prov DPC MRN COM-160	?	Dr Dentist, My	Prov...	Kit Impianti	3Series +	Ponte	Produzione	12, 11, 21, 22	14/04/16 18.11
prov DPC MRN COM-160	?	Dr Dentist, My	Prov...	Kit Impianti	3Series +	Ponte	Produzione	16, 15, 14, 13	14/04/16 18.11
prov DNG GRZ COM-160	?	Dr Dentist, My	Prov...	Kit Impianti	3Series +	Ponte	Produzione	16, 15	14/04/16 18.09
prov DNG GRZ COM-160	?	Dr Dentist, My	Prov...	Kit Impianti	3Series +	Ponte	Produzione	16, 15	14/04/16 18.10
BRN CSM COM-160413-1	?	Dr Dentist, My	Zirco...	Kit Impianti	3Series +	Ponte	Produzione	16, 15, 14, 13	13/04/16 10.28
BRN CSM COM-160413-1	?	Dr Dentist, My	Zirco...	Kit Impianti	3Series +	Ponte	Produzione	16, 15, 14, 13	13/04/16 18.15

Anteprima


Anteprima non disponibile

Commenti

Nessun commento

File

3. Cliccare su “+ ” e poi su “IMPORTARE KIT IMPIANTI”

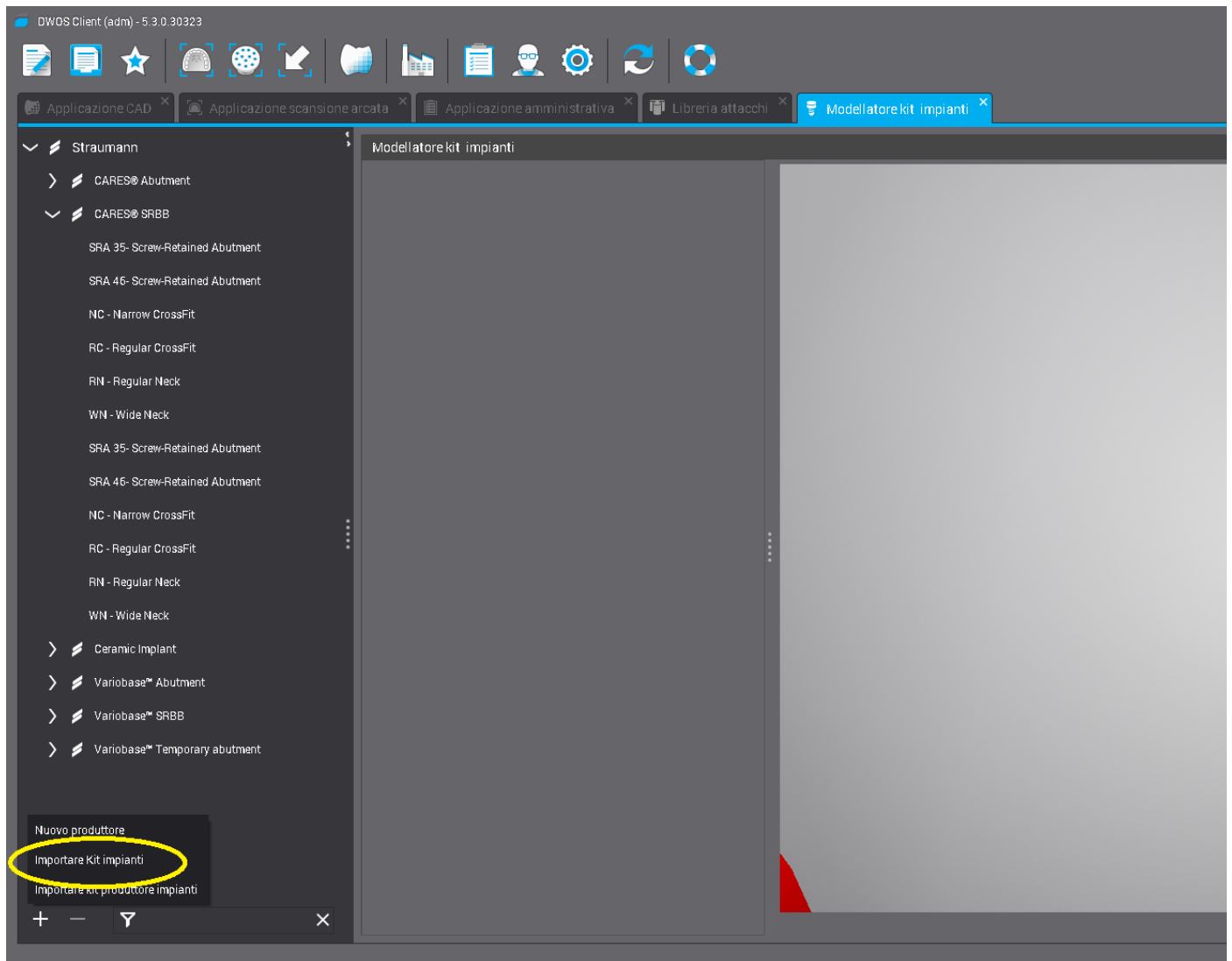

4. SUCCESSIVAMENTE CARICARE IL FILE SCARICATO:

