

La nueva referencia...



Imágenes: DT Antonio Lazetera, Savona, Italia

...para la confección eficiente de soluciones provisionales de larga duración y sustitutos dentales definitivos en la técnica protésica dental

- provisional y definitivo
- resistente a la rotura y fisiológico
- resistente a la tinción y la placa
- pulido excelente y cantos resistentes
- estético
- fiable y eficaz

top.lign professional polímero

Sistema compacto con todos los colores clásicos A-D

Color del tapón	Material	Cervical 1	Cervical 2	Enamel 1	Enamel 2	Colores	40g* REF	80g REF	200g REF
—	Cervical 1					—	proCV101		
—	Cervical 2					—	proCV201		
—	Enamel 1					—	proEN101	proEN108	proEN102
—	Enamel 2					—	proEN201	proEN208	proEN202
—	Transparent					—	proTran1		
—	Bleach					—	proBL301		
—	Dentin A1	✓		✓		—	proDA101	proDA108	proDA102
—	Dentin A2	✓		✓		—	proDA201	proDA208	proDA202
—	Dentin A3	✓		✓		—	proDA301	proDA308	proDA302
—	Dentin A3,5		✓		✓	—	proDA351	proDA358	proDA352
—	Dentin A4				✓	—	proDA401	proDA408	
—	Dentin B1	✓		✓		—	proDB101	proDB108	
—	Dentin B2	✓		✓		—	proDB201	proDB208	
—	Dentin B3	✓		✓		—	proDB301	proDB308	
—	Dentin B4		✓		✓	—	proDB401	proDB408	
—	Dentin C1	✓		✓		—	proDC101	proDC108	
—	Dentin C2		✓		✓	—	proDC201	proDC208	
—	Dentin C3		✓		✓	—	proDC301	proDC308	
—	Dentin C4		✓		✓	—	proDC401	proDC408	
—	Dentin D2	✓		✓		—	proDD201	proDD208	
—	Dentin D3	✓		✓		—	proDD301	proDD308	
—	Dentin D4	✓		✓		—	proDD401	proDD408	

Cuando el trabajo es urgente ...
Mezcle simplemente un 70% de Dentin con un 30% de Enamel y ahórrese un paso.

*también disponible en un conjunto


top.lign professional monómero



top.lign professional liquid
100 ml, REF proLiq01
500 ml, REF proLiq05

Consejo práctico:
Para la personalización estética utilice el composite de revestimiento **crea.lign**® en combinación con las carillas de revestimiento **ново.lign**® del sistema **visio.lign**®.

Otra oferta interesante para usted:

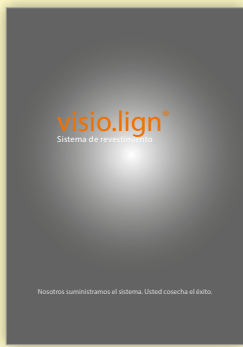

REF 0095040E



REF 0005950E

0005760E-20181024 Irrtum und Änderungen vorbehalten



Material autopolimerizante de color diente
para prótesis provisionales y definitivas

¿Qué hace sobresaliente a top.lign professional?

provisional y definitivo

- Homologado para trabajos provisionales y definitivos
- Producto sanitario certificado de la clase IIa

resistente a la rotura y fisiológico

- Su excelentes propiedades mecánicas (resistencia a la flexión: aprox. 100 Mpa, módulo de elasticidad: aprox. 2600 Mpa) consiguen una combinación perfecta de la resistencia y la elasticidad fisiológica requeridas para una prótesis
- Resistencia a la rotura doble en las soluciones para puentes (en comparación con las resinas para provisionales habituales del mercado)
- Especialmente indicado para trabajos de prótesis implantar

resistente a la tinción y la placa

- La compacta estructura molecular del producto permite conseguir un pulido de intenso brillo y evita la adhesión de placa
- La reticulación completa del material reduce la absorción de agua y las pequeñas tinciones

pulido excelente y cantos resistentes

- Sus buenas cualidades para el pulido permiten trabajar de forma especialmente rápida y sencilla
- Gracias a su gran resistencia en los cantos los trabajos de rectificación dan resultados óptimos

estético

- Se consigue una estética perfecta gracias al completo surtido de polímeros disponible en los colores clásicos A-D
- Gracias a la estructura molecular y la utilización de colores luminiscentes, incluso los trabajos monolíticos resultan muy naturales
- Permite la personalización estética con el composite de revestimiento crea.lign® (sistema de colores armonizados)

fiable y eficaz

- Vaciado sin burbujas
- Resultados de ajuste preciso
- Unión sin espacios intermedios con las carillas de revestimiento y los dientes completos sin adhesivo químico adicional



Indicaciones

Trabajo dental provisional

Puentes de carga inmediata sobre implantes o dientes naturales también para trabajos provisionales de larga duración (uso durante > 6 meses)

- Fijo y semifijo
- Con y sin carillas de revestimiento
- Con y sin soporte de estructura

Puente implantosoportado con carga inmediata



Puente con carga inmediata, monolítico de top.lign professional

Imágenes: MTD Sebastian Schuldes, Eisenach (Alemania)



Trabajo creado



Trabajo in situ

Prótesis provisional sobre dientes naturales



Puente de top.lign professional

Imágenes: TD Andrea Foschi, Ravenna, Italia



Situación de partida



Trabajo in situ

Prótesis definitiva

Trabajo dental implantosoportado

- Removible y parcialmente removible (p. ej. trabajo de barras)
- Con carillas de revestimiento, dientes completos o crea.lign

Prótesis parciales y totales

- Trabajos telescópicos
- Esquelético

Prótesis definitiva implantosoportada



Puente de top.lign professional y encía terminada, personalización con crea.lign

Imágenes: TD Christian Dalla Libera, Padua, Italia



top.lign professional sin procesar



Trabajo in situ

Prótesis removible



Esquelético con top.lign professional y carillas de revestimiento novo.lign



Vertido de top.lign professional en la llave



Trabajo sobre el modelo