

Новый эталон...



Изображение: ST Антонио Лазеттери (Antonio Lazetteri), Савона, Италия

...для эффективного изготовления рассчитанных на длительный срок временных конструкций и постоянных зубных протезов в области протезирования на имплантатах

- ▶ Подходит для временных и постоянных изделий
- ▶ Высокопрочный и физиологичный
- ▶ Устойчив к изменению цвета и возникновению зубного налета
- ▶ Превосходно полируется и имеет стабильные кромки
- ▶ Эстетичный
- ▶ Надежный и эффективный

bredent

Разновидности изделий top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Полимер top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Компактная система со всеми классическими цветами A–D

| Цвет кол-пачка | Материал | Шейка зуба 1 | Шейка зуба 2 | Эмаль 1 | Эмаль 2 | Цвета | 40 г* | | |
|----------------|----------|--------------|--------------|---------|---------|-------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | № | № | № |
| Шейка зуба 1 | | | | | | — | proCV101 | | proCV102 |
| Шейка зуба 2 | | | | | | — | proCV201 | | proCV202 |
| Эмаль 1 | | | | | | — | proEN101 | proEN108 | proEN102 |
| Эмаль 2 | | | | | | — | proEN201 | proEN208 | proEN202 |
| Прозрачный | | | | | | | proTran1 | | proTran2 |
| Осветленный | | | | | | | proBL301 | | proBL302 |
| Дентин A1 | | ✓ | | | | | proDA101 | proDA108 | proDA102 |
| Дентин A2 | | ✓ | | | | | proDA201 | proDA208 | proDA202 |
| Дентин A3 | | ✓ | | | | | proDA301 | proDA308 | proDA302 |
| Дентин A3,5 | | | ✓ | | | | proDA351 | proDA358 | proDA352 |
| Дентин A4 | | | ✓ | | | | proDA401 | proDA408 | proDA402 |
| Дентин B1 | | ✓ | | | | | proDB101 | proDB108 | proDB102 |
| Дентин B2 | | ✓ | | | | | proDB201 | proDB208 | proDB202 |
| Дентин B3 | | ✓ | | | | | proDB301 | proDB308 | proDB302 |
| Дентин B4 | | | ✓ | | | | proDB401 | proDB408 | proDB402 |
| Дентин C1 | | ✓ | | | | | proDC101 | proDC108 | proDC102 |
| Дентин C2 | | | ✓ | | | | proDC201 | proDC208 | proDC202 |
| Дентин C3 | | | ✓ | | | | proDC301 | proDC308 | proDC302 |
| Дентин C4 | | | ✓ | | | | proDC401 | proDC408 | proDC402 |
| Дентин D2 | | ✓ | | | | | proDD201 | proDD208 | proDD202 |
| Дентин D3 | | ✓ | | | | | proDD301 | proDD308 | proDD302 |
| Дентин D4 | | ✓ | | | | | proDD401 | proDD408 | proDD402 |

*также доступно в наборе

Когда работа должна выполняться быстро...

Просто смешайте 70 % дентина с 30 % эмали и сэкономьте себе целый этап работы.

Мономер top.lign professional «топ.лайн профессионал»




Жидкость top.lign professional «топ.лайн профессионал»
100 мл, № proLiq01
500 мл, № proLiq05

Совет:

Для эстетичного индивидуального исполнения используйте облицовочный композит **crea.lign® «креа.лайн»** в сочетании с фасетками **novo.lign® «ново.лайн»** из системы **visio.lign® «визио.лайн»**.

Еще одно интересное предложение для Вас

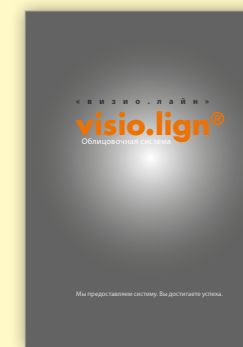

REF 009504 RU

bredent

Обращаться в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Германия · Тел.: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Факс: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · @: info@bredent.com



Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений. 000576RU-20160921

top.lign professional «топ.лайн профессионал»



Пластмасса холодной полимеризации для временных и постоянных зубных протезов

bredent

Чем отличается top.lign professional «топ.лайн профессионал»?

Подходит для временных и постоянных изделий

- Допустим для временных и постоянных протезов.
- Сертифицирован как медицинский продукт класса II а.

Высокопрочный и физиологичный

- Превосходные механические значения (прочность на изгиб: около 100 МПа, модуль упругости: около 2600 МПа) позволяют создавать идеальное сочетание необходимой стабильности протеза и физиологической эластичности.
- Вдвойне более прочные мостовидные протезы (по сравнению с временными полимерными изделиями, продаваемыми на рынке).
- Особенно подходит для работ по имплантационному протезированию.

Устойчив к изменению цвета и возникновению зубного налета

- Компактная молекулярная структура материала позволяет полировать его до зеркального блеска и предотвращает отложение зубного налета.
- Благодаря полному «сшиванию» материала уменьшается влагоемкость, не возникает пожелтения или иного изменения цвета.

Превосходно полируется и имеет стабильные кромки

- Отличные полировочные свойства позволяют крайне быстро и просто обрабатывать материал.
- Оптимальная шлифовка благодаря высокой стабильности кромок.

Эстетичный

- Идеальный эстетичный внешний вид благодаря комплексному предложению и полному ассортименту в классических цветах А–D.
- Благодаря молекулярной структуре и применению люминесцентных красок даже монолитно изготовленные протезы имеют весьма естественный вид.
- Возможно эстетичное индивидуальное исполнение с помощью облицовочного композита crealign® «креа.лайн» (сочетающиеся между собой шкалы цветов).

Надежный и эффективный

- Заливка без образования пузырьков.
- Точные результаты.
- Безазорное соединение с облицовочными оболочками и цельными зубами без необходимости дополнительного химического бондинга.



Показания

Временное протезирование

Мосты, подвергающиеся немедленной нагрузке, на имплантатах или естественных зубах; материал подходит даже для временных конструкций, которые рассчитаны на длительный срок (срок службы > 6 месяцев)

- Несъемные и условно-съемные
- С облицовочными оболочками и без
- С поддержкой каркаса и без

Подлежащий немедленной нагрузке мост на имплантатах



Подлежащий немедленной нагрузке мост, монолитно изготовленный из top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Изображения: МЗТ Себастиан Шультес (ZTM Sebastian Schuldes), Айзенх, Германия



Отлитый протез



Протез в полости рта пациента

Временный протез на естественных зубах



Мост из top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Изображения: ЗТ Андреа Фосчи (ZT Andrea Foschi), Равенна, Италия



Начальные условия



Протез в полости рта пациента

Постоянное протезирование

Протезы на имплантатах

- Условно-съемные и съемные (например, балочные протезы)
- С облицовочными оболочками, цельными зубами или crealign «креа.лайн»
- С поддержкой каркаса

Частичные и полные протезы

- Телескопические протезы
- Отливка кламмерной модели

Постоянный протез на имплантатах



Мост из top.lign professional «топ.лайн профессионал» и обработанной десны, индивидуализирован с помощью crealign «креа.лайн»

Изображения: ЗТ Кристиан Далла Либера (ZT Christian Dalla Libera), Падуа, Италия



top.lign professional «топ.лайн профессионал» в необработанном виде



Протез в полости рта пациента

Съемный протез



Кламмерный протез из top.lign professional «топ.лайн профессионал» и облицовочных оболочек novo.lign «ново.лайн»



Заливка top.lign professional «топ.лайн профессионал» в предварительную матрицу



Протез на модели