

crea.lign

del sistema **visio.lign**

Esquema de estratificación para la personalización del ROJO y BLANCO

Esquema de estratificación para crea.lign GUM



El hueso representado con el color beige.



Con el color lila se consigue la sensación de profundidad. El lila se arrastra desde el pliegue hasta los dientes.



Con el rosa se cubren las capas precedentes.



Con pink se destacan los alveolos.



Con red se destacan las zonas de intensa irrigación sanguínea.



El tono light se aplica en el borde incisal.



Con transpa se sella toda la superficie.

bredent

bredent group Spain SL · Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · T: 961310561 / 607320666 · @: bredentgroup@bredent.es
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany
T: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 56 · F: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 · www.bredent.com · @: info@bredent.com

crea.lign

del sistema **visio.lign**

Esquema de estratificación para la personalización del ROJO y BLANCO

Esquema de estratificación para crea.lign Paste GUM



Formar la zona marginal con Paste PO.



Construir los alveolos con Paste PL.



El tono light se aplica en el borde incisal.



Con el color lila se consigue la sensación de profundidad.



Con red se destacan las zonas de intensa irrigación sanguínea.



Con transpa se sella toda la superficie.

bredent

bredent group Spain SL · Asesoramiento técnico: Isabel García Thierfeldt · T: 961310561 / 607320666 · @: bredentgroup@bredent.es
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany
T: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 56 · F: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 · www.bredent.com · @: info@bredent.com



Salvo error y modificaciones 0094850E-20160411