

crea.lign

powered by visio.lign

Schéma de stratification pour la personnalisation ROUGE-BLANC

Mode d'emploi pour la stratification avec crea.lign GUM



Avec le beige on représente les tissus osseux.



Avec la teinte lilas on obtient l'effet de profondeur. La teinte lilas est étalée du repli alvéolo-lingual vers les dents.



Avec le rose on recouvre les couches précédentes.



Avec le pink on souligne les alvéoles.



Avec le rouge (red) on souligne les zones à bonne irrigation sanguine.
Light est appliqué le long du liseré gingival.



Avec transpa on procède au scellement de toute la surface.

crea.lign

powered by **visio.lign**


Schéma de stratification pour la personnalisation ROUGE-BLANC

Mode d'emploi pour la stratification avec la pâte crea.lign GUM




 Avec la pâte PO procéder à la conception de la zone marginale.




 Avec la pâte PL monter les alvéoles.




 Avec light appliquer le liseré gingival.



 Avec lilas on obtient l'effet de profondeur.

 Avec le rouge (red) on souligne les zones à bonne irrigation sanguine.



 Avec transpa on scelle toute la surface.

bredent

Coordonnées pour la France - bredent France:
Coordonnées pour les autres pays francophones:
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany

T: 04.75.34.20.96
T: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 51

F: 04.75.32.05.93
F: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44

@: france@bredent.com
@: info@bredent.com
www.bredent.com



Sous réserve d'erreurs et de modifications 0094850F-20160411