

crea.lign

powered by visio.lign

Schema per la caratterizzazione dell'estetica bianca e rosa

Istruzioni per la stratificazione con crea.lign GUM



Con la massa beige viene riprodotto il tessuto osseo.



Con la massa lilla si ottiene un effetto di profondità. La massa lilla viene applicata sulla zona delle pieghe trasverse fino ai denti.



Con la massa rosa vengono coperti gli strati precedenti.



Con la massa pink vengono messi in risalto gli alveoli.



Con la massa rossa vengono messe in risalto le zone ben irrorate di sangue.



Con la massa transpa viene sigillata l'intera superficie.



La massa light viene applicata sul bordo gengivale.

crea.lign

powered by **visio.lign**

Schema per la caratterizzazione dell'estetica bianca e rosa Istruzioni per la stratificazione con crea.lign GUM in pasta



Con la massa in pasta PO viene realizzata la zona del margine.



Con la massa in pasta PL vengono creati gli alveoli.



Applicare la massa light sul bordo gengivale.



Con la massa lilla si ottiene un effetto di profondità.



Con la massa rossa vengono messe in risalto le zone ben irrorate di sangue.



Con la massa transpa viene sigillata l'intera superficie.

bre^{dent} s.r.l.

bre^{dent} srl · Via Roma 10 · 39100 Bolzano · Italy · T: (+39) 0471 / 469576 - 400781 · F: (+39) 0471 / 469573 · www.bre^{dent}.it · @: info@bre^{dent}.it
P.IVA - Codice Fiscale - R.I. di Bolzano N. 02240570214 · Cap. Soc. I.V. Euro 50.000 · REA n. BZ-165004



Salvo modifiche ed errori 00948501-20160411