

# crea.lign

powered by visio.lign

## Schichtschema zur ROT-WEISS Individualisierung

### Schichtanleitung crea.lign GUM



Mit beige wird der Knochen dargestellt.



Mit lila wird die Tiefenwirkung erzielt. Lila wird von der Umschlagfalte zu den Zähnen hin ausgestrichen.



Mit rosa werden die vorigen Schichten abgedeckt.



Mit pink werden die Alveolen betont.



Mit red werden die gut durchbluteten Bereiche betont.



Mit transpa wird die ganze Oberfläche versiegelt.

Light wird am Zahnfleischsaum aufgetragen.

bredent

GmbH & Co. KG · 89250 Senden · Germany · T: (+49) 0 73 09 / 8 72-22 · F: (+49) 0 73 09 / 8 72-24 · www.visio-lign.com · @: info@bredent.com

# crea.lign

powered by visio.lign

## Schichtschema zur ROT-WEISS Individualisierung

### Schichtanleitung crea.lign Paste GUM



Mit Paste PO den Randbereich gestalten.



Mit Paste PL die Alveolen aufbauen.



Mit light den Zahnfleischsaum auftragen.



Mit lila wird die Tiefenwirkung erzielt.



Mit red werden die gut durchbluteten Bereiche betont.



Mit transpa wird die ganze Oberfläche versiegelt.

bredent

GmbH & Co. KG · 89250 Senden · Germany · T: (+49) 0 73 09 / 8 72-22 · F: (+49) 0 73 09 / 8 72-24 · www.visio-lign.com · @: info@bredent.com

Irrtum und Änderungen vorbehalten 0094850D-20160411

