

crea.lign

Composito per il rivestimento estetico



Riabilitazione implanto-protesica

© 2016 by Odt. Andreas Lüdke, Bayreuth, Germania



create natural beauty

Estetica bianca e rosa

powered by
visio.lign

visio.lign

Un sistema completo per il rivestimento estetico e funzionale, perchè consente di utilizzare straordinarie tecniche individuali di rivestimento con risultati estetici naturali, funzionali e biocompatibili. Un sistema aperto che garantisce flessibilità e libertà di lavorazione, grazie a 6 componenti perfettamente compatibili tra loro: crea.lign, novo.lign, neo.lign, visio.CAM, visio.paint & bond.lign. Lo strumento adatto per ogni flusso di lavoro, la migliore premessa per una soluzione implanto-protetica precisa. visio.lign - Il sistema che garantisce stabilità e sicurezza. Il risultato: soluzioni protesiche definitive, estremamente resistenti al carico oclusale e alla decolorazione.

Risultato estetico naturale e di lunga durata


crea.lign



Δ E - Tendenza alla decolorazione

Sostanze coloranti:

Conservazione in caffè, tè, tabacco, vino rosso

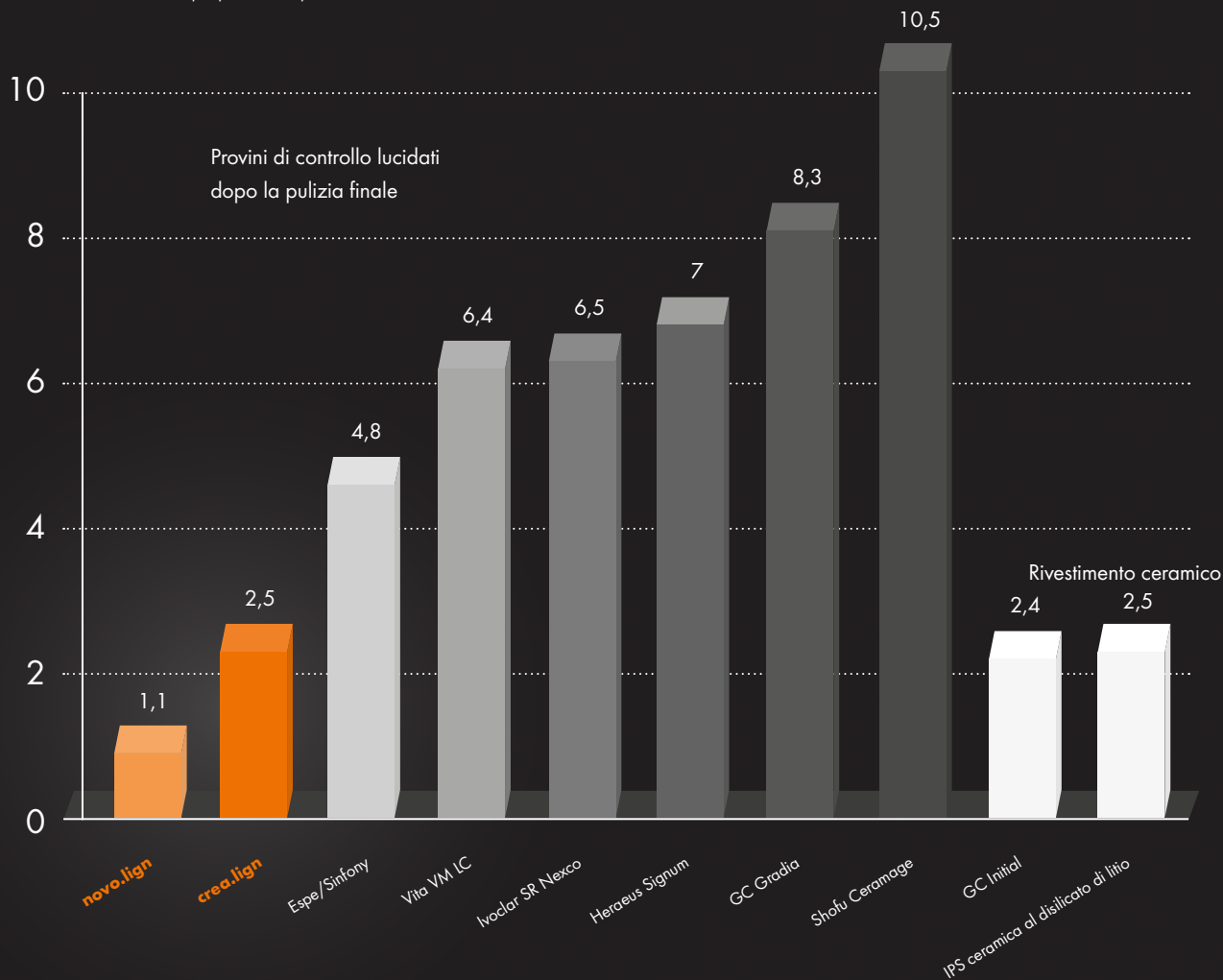

Nuova formula del crea.lign Gel e GUM (light, pink, rosa, rosso, lilla).


Vantaggi:

- Restauri di lunga durata grazie ad un'elevata resistenza alla rottura
- Nè incrinature o fratture grazie all'elasticità del materiale sulla resina per protesi
- Perfetta polimerizzazione in profondità grazie alla particolare trasmissione della luce
- È possibile la stratificazione direttamente sul BioHPP, con l'applicazione dell'opaco ed utilizzando il primer visio.link
- Effetto naturale senza opalescenza nelle masse GUM
- Modellazione più confortevole, grazie ad una migliore stabilità del crea.lign in gel
- Facile applicazione delle paste grazie ad una migliore consistenza e ad una ridotta viscosità

Grafico "Ricerche sulla tendenza alla decolorazione":

© 2016 by Dr. Rzanny, Università di Jena, Germania

“Flessibilità in tutti i campi d’applicazione”

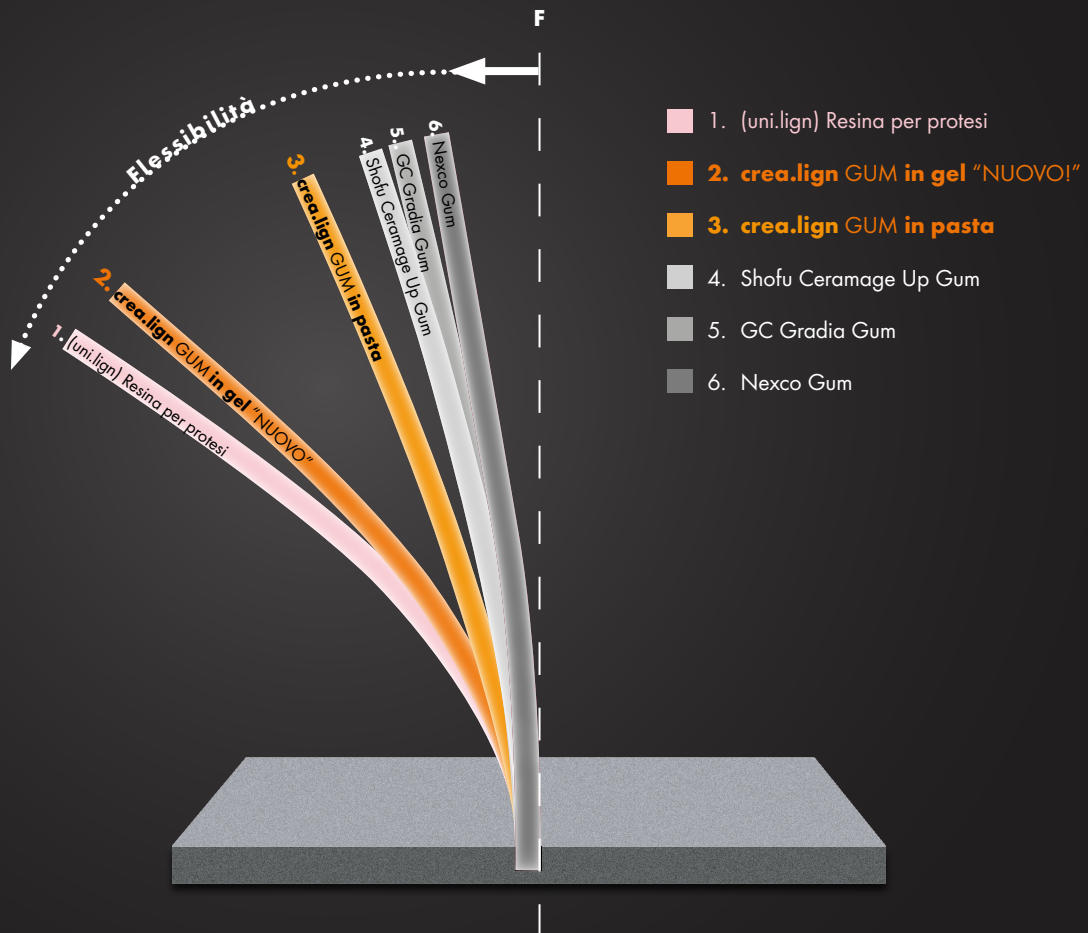

Estetica bianca & rosa con crea.lign.

Rapida. Semplice. Di lunga durata. Con possibilità di reintervento.

La soluzione per:

- protesi fisse o rimovibili definitive a supporto implantare,
- la caratterizzazione di protesi totali con un risultato estetico naturale,
- tutti i materiali per manufatti, inclusi il BioHPP e i materiali PEEK,
- la caratterizzazione e la finalizzazione anche di restauri full-arch (come ad esempio ponti in Prettau)

“Scelta individuale ...



Caratterizzazione con
crea.lign in gel

... del tipo di lavorazione"




Caratterizzazione con

crea.lign in pasta

crea.lign
in pasta PL light

crea.lign
in pasta PO opaco

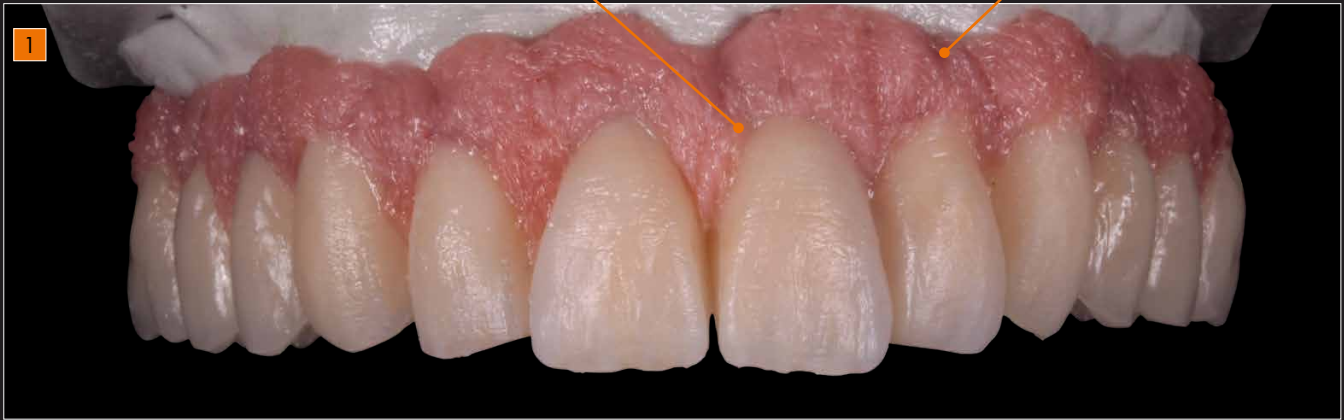

crea.lign in pasta PO (pasta opaca) viene applicato sulla zona del margine e crea.lign in pasta PL (pasta Light) sul bordo gengivale. Successivamente la superficie viene "lavorata a buccia d'arancia".

Nelle zone di profondità che si vengono a creare viene applicato il crea.lign rosso/lilla e polimerizzato.

Al termine con il crea.lign Transpa viene sigillata la superficie, levigata e si procede con la polimerizzazione finale.





crea.lign in pasta



“ Del crea.lign GUM in pasta apprezzo le eccezionali proprietà di modellazione e l'effetto cromatico molto fedele alla realtà. La lavorazione è molto veloce, facilmente eseguibile e garantisce risultati entusiasmanti. ”



Odt. Andreas Lüdtke

crea.lign in gel



crea.lign
in gel rosa

crea.lign
in gel light



“ Il materiale per il rivestimento estetico crea.lign GUM in gel esalta maggiormente i vantaggi dei manufatti in polimeri ad elevate prestazioni. La sensazione nel cavo orale, il risultato estetico e una durata a lungo termine garantiscono una combinazione unica. ”



M. Odt. Philipp von der Osten

Set per l'estetica bianca e rosa

Con le masse GUM crea.lign, del sistema visio.lign, potrete caratterizzare individualmente le Vostre protesi fino ad ottenere un risultato estetico High-End. Offrite ai Vostri clienti quest'ulteriore servizio di

caratterizzazione individuale, facendo aumentare il valore aggiunto del Vostro laboratorio.

Fate delle Vostre protesi il biglietto da visita del Vostro laboratorio.

REF CLIGNSETG



Contenuto:

5 x 5 g crea.lign in gel, GUM (light, pink, rosa, rosso, lilla)

2 x 3 g crea.lign in pasta, GUM (PO,PL)

1 x 5 g crea.lign in gel, Modifier beige

1 x crea.lign in gel, Transpa clear

1 x 4 g crea.lign opaco, GUM

1 x 10 ml crea.lign Modelling Liquid

1 x 10 ml visio.link

1 x Pennello Unique Brush, grand. 4

1 x Dispenser con LED UV (crea.lign in gel)

1 x Blocco da impasto

1 x Cannule d'applicazione + copri-punta

2 x Pistone per siringhe (crea.lign in pasta)


1 x Istruzioni per la caratterizzazione

crea.lign in gel o in pasta

Masse dentinali



Gel

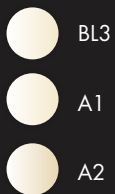

Pasta




crea.lign in gel

GUM



Gel

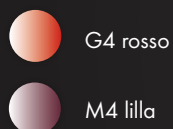

crea.lign in pasta

GUM




Pasta



crea.lign in gel

Masse smalto & incisali

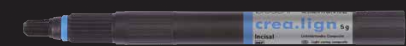

Gel



Modificatori



Gel



Transpa Clear



Gel



visio.lign

Il sistema per un rivestimento estetico naturale e funzionale

visio.lign - depliant informativi




REF 00057701

crea.lign
composito per il rivestimento estetico
I molteplici campi d'applicazione di questo composito compatto per un rivestimento con risultati estetici High-end, presentati in modo semplice e chiaro.



REF 00059001

bre.Lux
Power Unit 2
L'apparecchio con luce a LED è ottimo per la lavorazione di crea.lign - le più importanti informazioni raccolte in una breve sintesi.

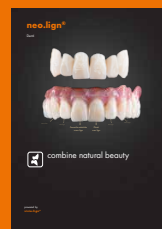

REF 00030501

Denti neo.lign
Il design e la funzionalità dei denti neo.lign Vi sorprenderanno. Scopritene la varietà e cercate il design desiderato.



crea.lign - composito estetico

Il composito fotopolimerizzabile, con nanoparticelle ceramiche, convince per la sua naturale opalescenza e per l'ottima trasmissione della luce - per un risultato estetico naturale.




novo.lign - faccette estetiche

Le faccette estetiche novo.lign sono dotate di differenti morfologie oclusali, di effetti di profondità naturali e di una stratificazione morfologicamente identica a quella dei denti naturali. Il gold standard per la protesi implantare.



visio.CAM - blank in composito

I materiali del sistema visio.lign sono ora disponibili in formato blank per le lavorazioni con i sistemi CAD/CAM ed hanno una perfetta compatibilità con tutti gli altri prodotti estetici visio.lign.

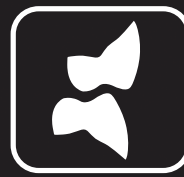

neo.lign - denti preconfezionati

Colori, forme e materiali dei denti neo.lign sono perfettamente compatibili con quelli delle faccette estetiche novo.lign - ottimi per la tecnica combinata.



bond.lign - sistemi d'adesione

Il sistema primer/bonder per un'adesione chimica sicura tra i componenti del sistema visio.lign (faccette novo.lign, denti neo.lign, HIPC, resine e compositi) come anche su strutture in BioHPP (PEEK).



visio.paint - supercolori

I supercolori visio.paint permettono di caratterizzare i rivestimenti estetici in modo semplice e rapido, utilizzandoli sia come internal stain che nella tecnica di pittura superficiale, rivestendoli poi con un sottile strato di crea.lign Transpa.



REF 00027401

visio.lign

Cartella informativa

Le informazioni sui più importanti materiali del sistema visio.lign raccolti in un'unica cartella.



REF 00950401

visio.lign

Presentazione del sistema

La gamma dei prodotti del sistema visio.lign presentata in un unico catalogo.



REF 00023401

visio.lign

Manuale

Le istruzioni, fase per fase, delle diverse tecniche di lavorazione e delle indicazioni per il sistema visio.lign.

crea.lign

Composito per il rivestimento estetico



create natural beauty
Estetica bianca e rosa

bredent
group

00065101-20210705
Salvo modifiche ed errori

