

Provisoire SKY fast & fixed




Restauration provisoire conjointe avec
facettes novo.lign & top.lign professional


Quick Guide

bredent

Restauration provisoire conjointe avec facettes novo.lign & top.lign professional

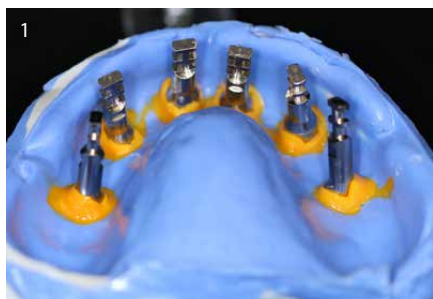

1
Repositionnement des coiffes d'empreinte à l'inclusion des analogues de laboratoire

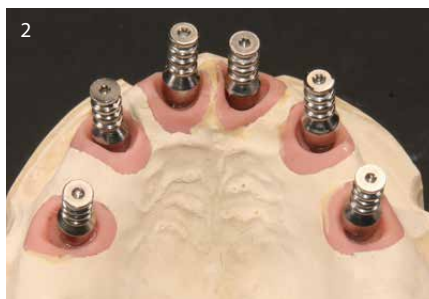

2
Confection du modèle avec fausse gencive (Multisil-Mask doux) et plâtre extra-dur de la classe 4 (Exakto-Rock 5)



3
Mise en articulateur à l'aide d'un mordu.



4
Vissage des coiffes prothétiques, le cas échéant, il est nécessaire de les raccourcir. Montage en cire avec facettes novo.lign et cire de montage; ensuite réalisation de la clé avec haptosil D & visio.sil fix



5
Préparer les facettes novo.lign :
- Sabler avec de l'oxyde d'aluminium (110µm, 2-3 bars)
- Enlever la poussière de sablage avec de l'air comprimé exempt d'huile – ne pas nettoyer au jet de vapeur ! Eventuellement appliquer top.lign professional liquid sur les zones difficiles d'accès.
Un bonding chimique n'est pas nécessaire.



6
Placer des tubulures de silicone sur les coiffes prothétiques en tant que mainteneur d'espace pour le joint de collage ultérieur.



7
Intégrer une coiffe prothétique dans la prothèse. Fermer le canal de vis avec un pin de fermeture SKY pour canal de vis.



8
Appliquer une fine couche d'Isoplast sur le modèle en plâtre -> éviter la formation de barbes. Placer la clé avec les facettes sur le modèle.



9
Mettre en dépouille la zone linguale à l'aide de bandes en cire afin d'empêcher un écoulement de la résine.



10 Mélanger homogènement top.lign professional avec un rapport de mélange de 10 g pour 7 ml & laisse gonfler 30 sec.



11 Couler top.lign professional dans la clé. Le temps de travail est de 3-5 minutes.




12 Le positionnement correct se fait avec le Posi-boy.



13 Cocotte, 3-4 bars, env. 50°C, 10 minutes



14 Travailler avec les fraises et léger pré-polissage. La conception basale doit être telle à ne pas permettre l'adhérence de restes de nourriture.

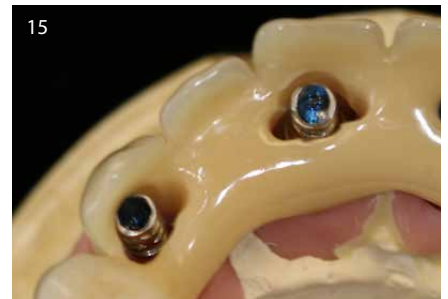

15 Faire de la place pour les coiffes prothétiques et mettre de petites rainures en place pour pouvoir appliquer plus facilement la résine en bouche.




16 Préparation avec Qu-Connector



17 Collage en bouche exempt de tensions avec Qu-resin dentin, contrôle de l'occlusion après le collage (sinon danger de fracture)



18 Enlever les excédents de Qu-resin dentin et dégrossir. Polissage à l'aide d'une brosse en poils de chèvre et polissoir en coton. Repolir éventuellement avec la pièce à main et Acrypol. Surtout bien polir les parties basales.

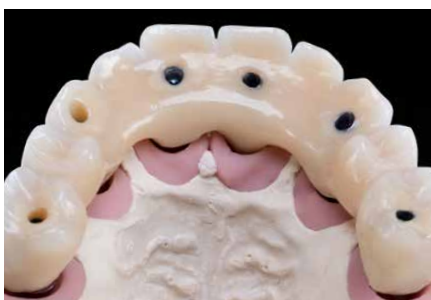

Provisoire terminé, ensuite on procède à l'insertion dans la bouche du patient.



Produits utilisés

Article	REF	Conditionnement
Polymère top.lign professional	dépend de la teinte et de la taille du coffret	22 teintes 40 g, 80 g, 200 g
top.lign professional liquid	Proliq01 Proliq05	100 ml 500 ml
Facettes novo.lign	dépend de la teinte et de la forme	17 teintes 15 formes de dents antérieures et 3 postérieures
haptosil D	54001180 54001190	2x 1300 g 2x 7500 g
visio.sil fix	54001300	50 ml en double cartouche
Cire de montage 3 rose	43001510	220 g
Posi-boy	36001010	1 pièce
Fraise	cf. prospectus 0007530F	1 pièce
Pâte à polir Acrypol	52000170	170 g
Brossette à poils de chèvre	35000550 35000540	resp. 15 pièces
Polissoir en coton	35000650	15 pièces
Fausse gencive Multisil-Mask, douce	54001047	50 ml en double cartouche
Plâtre extra-dur Exakto-Rock Scan, classe IV, pour modèles Scan	5700SE52 5700SE51 5700SE50	2 kg 5 x 2 kg 10 x 2 kg
Assortiment Qu-Connector et Qu-resin dentin	54001162	1 pièce



Facettes cosmétiques novo.lign



Qu-resin dentin



top.lign professional

