

SKY fast & fixed - protesi provvisorie




**Protesi fisse provvisorie con
faccette estetiche novo.lign & top.lign professional**


Guida rapida

bredent

Protesi fisse provvisorie con faccette estetiche novo.lign & top.lign professional

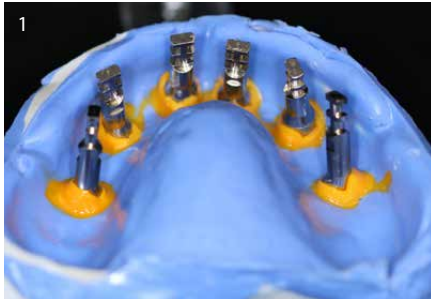

1
Si applicano i transfert da impronta, inclusi gli analoghi da laboratorio.

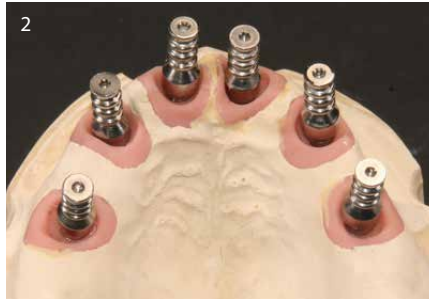


2
Viene realizzato il modello con la mascherina per finta gengiva (Multisil-Mask morbido) e con il gesso extra-duro di classe 4 (Exakto-Rock S).



3
Grazie ai rilievi della masticazione si procede alla messa in articolatore dei modelli.



4
Avvitare le cappette protesiche e se necessario accorciarle opportunamente; realizzare il montaggio in cera con le faccette estetiche novo.lign e la cera per montaggio rosa; infine realizzare la mascherina con haptosil D & visio.sil fix.

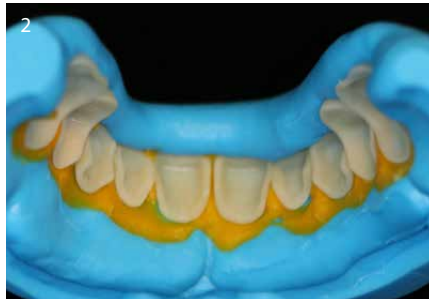

5
Preparazione delle faccette estetiche novo.lign:
- sabbare con AL₂O₃ (110 µm, a 2-3 bar)
- rimuovere i residui con aria compressa priva di oli – non utilizzare un getto di vapore! Eventualmente applicare sulle zone di difficile accesso il liquido top.lign professional. Non è necessario nessun bonding chimico!




6
Applicare sulle cappette protesiche i tubicini in silicone, come mantenitori di spazio per la successiva fase di incollaggio.



7
Integrare nella protesi una cappetta protesica, sulla quale viene applicato il perno di chiusura SKY per sigillare il canale della vite.



8
Sul modello in gesso applicare uno strato sottile di Isoplast -> evitare di formare dei ristagni. Posizionare sul modello la mascherina con le faccette estetiche.

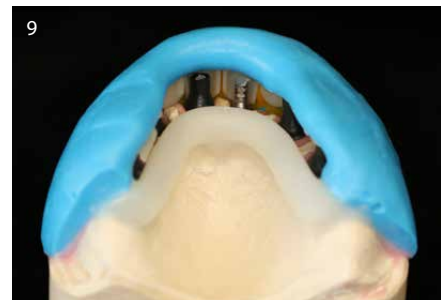

9
Proteggere la zona linguale con della cera, per evitare la fuoriuscita della resina in zone indesiderate.



10
Miscelare in modo omogeneo la resina top.lign professional con un rapporto di 10 g di polvere per 7 ml di liquido & lasciar riposare per 30 secondi.



11
Colare la resina top.lign professional nella mascherina. Il tempo di lavorazione è di 3-5 minuti.



12
Mantenere il modello nella posizione corretta utilizzando il Posi-boy.



13
Mettere in pentola a pressione, a 3-4 bar di pressione, a ca. 50°C, per 10 minuti.



14
Rifinire con frese in carburo di tungsteno ed eseguire una leggera prelucidatura. Basalmente la struttura dovrà essere lavorata in modo tale da facilitare il più possibile l'igiene da parte del paziente.



15
Creare lo spazio intorno alle cappette protesiche, realizzando delle piccole scanalature laterali - ciò facilita il fissaggio nel cavo orale con la resina Qu-resin.



16
Applicare Qu-Connector prima del fissaggio nel cavo orale.



17
Procedere a un incollaggio privo di tensioni nel cavo orale con Qu-resin dentin, dopo l'incollaggio si esegue un controllo dell'occlusione (per evitare il pericolo di fratture).



18
Rimuovere le eccedenze di Qu-resin dentin e rifinire. Lucidare con uno spazzolino in pelo di capra e con uno spazzolino in tela di cotone. Eventualmente lucidare a specchio con micro-motore e pasta Acrypol. Lucidare molto bene soprattutto la base.



Protesi provvisoria ultimata, successivamente si procede all'inserimento finale nel cavo orale del paziente.



I prodotti utilizzati

Articolo	REF	Confezione
top.lign professional polimero	Dipende dal colore e dalla confezione	22 colori 40 g, 80 g, 200 g
top.lign professional liquido	proLiq01 proLiq05	100 ml 500 ml
novo.lign faccette estetiche	Dipende dal colore e dal design	17 colori 15 elementi frontali e 3 elementi diatorici
haptosil D	540 0118 0 540 0119 0	2x 1300 g 2x 7500 g
visio.sil fix	540 0130 0	50 ml doppia cartuccia
Cera per montaggio 3 rosa	43001510	220 g
Posi-boy	360 0101 0	1 pezzo
Frese	vedere depliant 00075301	1 pezzo
Acrypol pasta per lucidatura a specchio	520 0017 0	170 g
Spazzolini in pelo di capra	350 0055 0 350 0054 0	cad. 15 pezzi
Spazzolino in tela di cotone	350 0065 0	15 pezzi
Multisil-Mask silicone per finte gengive morbide	540 0104 7	50 ml doppia cartuccia
Exakto-Rock Scan, gesso extra-duro di classe IV, per modelli da scansione	570 0SE5 2 570 0SE5 1 570 0SE5 0	2 kg 5 x 2 kg 10 x 2 kg
Set Qu-resin dentin e Qu-Connector	540 0116 2	1 pezzo



novolign faccette estetiche



Qu-resin dentin



top.lign professional

