

top.lign professional



**Polymère à froid de teinte dentaire
pour restaurations provisoires et définitives**

bredent

Qu'est-ce qui distingue top.lign professionnel ?

Provisoire & définitif

- Agrémenté pour provisoires et restaurations définitives
- Certifié en tant que dispositif médical de la classe IIa

Résistant à la fracture & physiologique

- Excellentes valeurs mécaniques (résistance à la flexion : env. 100 Mpa, module E: env. 2600 Mpa) qui permettent une parfaite relation entre la stabilité nécessaire à une prothèse et l'élasticité physiologique
- Double résistance à la fracture pour les restaurations par bridges (en comparaison aux résines classiques provisoires)
- Tout particulièrement adapté aux travaux en prothèse implantaire

Résistant à la décoloration & à la plaque

- La structure moléculaire compacte du matériau permet un polissage haute brillance et évite l'accumulation de plaque
- Par la réticulation parfaite du matériau l'absorption d'eau est réduite, pas de jaunissement et pas de décolorations

Excellent polissage & stabilité des arêtes

- De très bonnes propriétés de polissage permettent une mise en œuvre particulièrement rapide et simple
- Meulage optimal grâce à la haute stabilité des arêtes

Esthétique

- Réalisation esthétique parfaite grâce à l'assortiment complet dans les teintes classiques A-D
- Par la structure moléculaire et l'emploi de teintes lumineuses même des ouvrages à réalisation monolithique ont un aspect naturel
- Possibilité d'une personnalisation esthétique avec le composite cosmétique crea.lign® (système de teintes harmonisées entre elles)

sûr & efficace

- Coulée sans formation de bulles
- Grande précision d'adaptation
- Cohésion sans hiatus avec les facettes cosmétiques et dents complètes sans bonding chimique supplémentaire



Indications

Provisoires & restaurations dentaires temporaires

Bridges à mise sous sollicitation immédiate sur implants ou dents naturelles, également pour provisoires de longue durée (durée en bouche > 6 mois)

- Restaurations conjointes et amovo-inamovibles
- Avec ou sans facettes cosmétiques
- Avec ou sans appui par une infrastructure

Bridge implanto-porté à mise sous sollicitation immédiate



Bridge pour mise sous sollicitation immédiate, monolithique en top.lign professional

Photos: ZTM Sebastian Schuldes, Eisenach, Allemagne



Ouvrage coulé



Ouvrage in situ

Provisoire sur dents naturelles



Bridge en top.lign professional

Photos: ZT Andrea Foschi, Ravenna, Italie



Situation au départ



Ouvrage in situ

Restaurations définitives

Restaurations dentaires implanto-portées

- Prothèses conjointes et adjointes (par ex. travaux sur barre)
- Avec facettes cosmétiques, dents complètes ou crea.lign
- Avec infrastructure comme support

Prothèses partielles et complètes

- Travaux télescopes
- Châssis à crochet

Restauration définitive implanto-portée



Bridge en top.lign professional et gencive façonnée, personnalisé avec crea.lign

Photos: ZT Christian Dalla Libera, Padua, Italie



top.lign professional non travaillé



Ouvrage in situ

Prothèse adjointe



Prothèse à crochet en top.lign professional et facettes cosmétiques novo.lign



Coulée de top.lign professional dans la clé



Ouvrage sur le modèle

La nouvelle référence...



Photos: ZT Antonio Lazzeri, Savona, Italie

...pour une réalisation efficace de provisoires longue durée et de restaurations dentaires définitives en prothèse implantaire

- provisoire & définitif
- résiste aux fractures & physiologique
- résiste à la décoloration & à la plaque
- se prête parfaitement au polissage & arêtes stables
- esthétique
- sûr & efficace

Variétés de produits top.lign professionnel

Polymère top.lign



Système compact avec toutes les teintes classiques A-D

Teinte Coiffe	Matériau	Cervical 1	Cervical 2	Enamel 1	Enamel	Teintes	40 g*	80 g	200 g
							REF	REF	REF
Black	Cervical 1					—	proCV101		
Black	Cervical 2					—	proCV201		
Blue	Enamel 1					—	proEN101	proEN108	proEN102
Blue	Enamel 2					—	proEN201	proEN208	proEN202
Blue	Transparent						proTran1		
Red	Bleach						proBL301		
Red	Dentine A1	✓		✓			proDA101	proDA108	proDA102
Red	Dentine A2	✓		✓			proDA201	proDA208	proDA202
Red	Dentine A3	✓		✓			proDA301	proDA308	proDA302
Red	Dentine A3,5		✓		✓		proDA351	proDA358	proDA352
Red	Dentine A4		✓		✓		proDA401	proDA408	
Red	Dentine B1	✓		✓			proDB101	proDB108	
Red	Dentine B2	✓		✓			proDB201	proDB208	
Red	Dentine B3	✓		✓			proDB301	proDB308	
Red	Dentine B4		✓		✓		proDB401	proDB408	
Red	Dentine C1	✓		✓			proDC101	proDC108	
Red	Dentine C2		✓		✓		proDC201	proDC208	
Red	Dentine C3		✓		✓		proDC301	proDC308	
Red	Dentine C4		✓		✓		proDC401	proDC408	
Red	Dentine D2	✓		✓			proDD201	proDD208	
Red	Dentine D3	✓		✓			proDD301	proDD308	
Red	Dentine D4	✓		✓			proDD401	proDD408	

Quand il faut faire vite...

Mélanger tout simplement 70% de Dentine avec 30% d'Enamel et économisez ainsi une étape de travail.

*également disponible en kit

Monomère top.lign professionnel



top.lign professional liquid

100 ml, REF proLiq01

500 ml, REF proLiq05

Conseil :

Pour une personnalisation esthétique veuillez utiliser le composite cosmétique **crea.lign**® en combinaison avec les facettes cosmétiques **ново.lign**® du système **visio.lign**®.

Encore des offres qui vont vous intéresser



REF 0095040F



REF 0005950F

