



bredent  
group

- 1 Con la masilla Dentin A3,5 o Modiflier beige se reviste el cuello del diente – usando un tono más oscuro que el color que más tarde tendrá el diente.
- 2 Con la masa Dentin A3 se reviste el cuerpo del diente y los mamelones.
- 3 Con visio.lign color brown se añade las finas fisuras del esmalte.
- 4 Aplicar sucesivamente alternando Incisal blue e Incisal rose sobre el mamelón.
- 5 Incisal blue se aplica por mesial y distal en el canto incisal.
- 6 Con Enamel E2 se construye todo el incisal.

- 1 Con la masilla Dentin A3,5 o Modiflier beige se reviste el cuello del diente – usando un tono más oscuro que el color que más tarde tendrá el diente.
- 2 Con la masa Dentin A3 se reviste el cuerpo del diente y los mamelones.
- 3 Con Enamel E2 se construye casi todo el incisal.
- 4 Con Incisal opal se completa la forma del borde incisal.

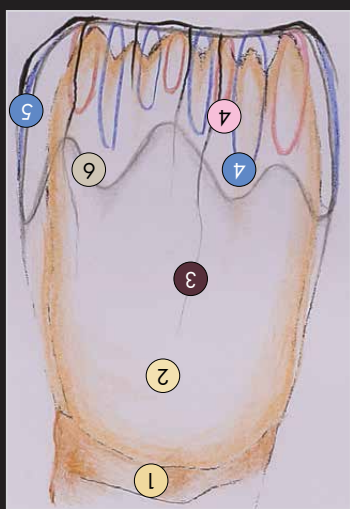

crealign  
Estratificación  
personalizada

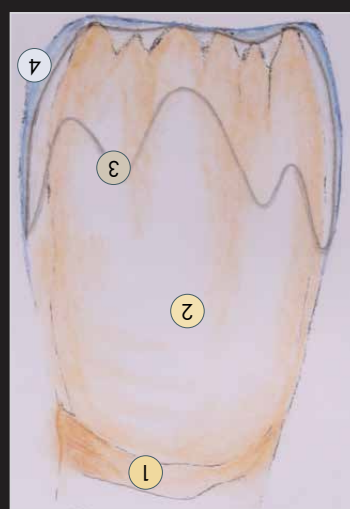

crealign  
Estratificación  
estándar

## Correspondencia del crealign opáquer con los colores de la dentina

crealign Opaker	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Gum	Z
Colores del sistema	A1 B2	A2	A3	B1/C1/ BL3	C2/C3/ D2/D4	B3 B4	A3,5	A4 C4	D3	Gum	Liner circonio

## Correspondencia de los incisales con los colores de la dentina

Enamel / Combinación A-D	BL3	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
E1	X	X					X				X				X		
E2			X	X				X									
E3					X				X	X		X	X			X	X
E4						X								X			

## Control de calidad del revestimiento

- ¿Todavía queda barrillo dentinal?
- Eliminar el barrillo dentinal con crealign surface cleaner y un cepillo para dientes.
- Tras la limpieza de los restos del pulido aplicando vapor, el revestimiento debería presentar un brillo intenso.

## Consejos prácticos y trucos

### Poco espacio para el revestimiento:

- Aplicar como primera capa el combo.lign del color adecuado. Cubrir necesariamente el combo.lign con las siguientes capas, pues no puede quedar en la superficie si se quiere evitar modificaciones del color o adhesión de placa.

### Pacientes sensibles (propensos a las alergias):

- Para garantizar una polimerización del 100 % del revestimiento es necesario respetar los tiempos de polimerización indicados. Dejar el trabajo terminado durante una hora a 55 °C en la olla a presión (no es necesario aplicar presión) o introducir agua hirviendo en un recipiente y dejar dentro el trabajo durante 30 minutos.

bredent  
group0098370E-20240228  
Salvo error y modificaciones