



bredent  
group

- 1 Avec la masse dentine A3,5 ou le Modflier beige on procède à la stratification de la zone cervicale – avec une nuance plus foncée que la future teinte dentaire.
- 2 Avec la masse dentine A3 continuer la stratification de la dent et des mamelons.
- 3 Avec Enamel E2 reconstruire toute la zone incisale.
- 4 Avec Incisal opal on complète la forme du bord incisif.

- 1 Avec la masse dentine A3,5 ou le Modflier beige on procède à la stratification de la zone cervicale – une nuance plus foncée que la future teinte dentaire.
- 2 Avec la masse dentine A3 continuer la stratification de la dent et des mamelons.
- 3 Avec visio.lign color brown imiter de fines fissures d'émail.
- 4 Appliquer alternativement Incisal bleu et Incisal rose sur les mamelons.
- 5 Incisal bleu se place sur la face mésiale et distale du bord incisif.
- 6 Avec Enamel E2 on reconstruit toute l'incisive.

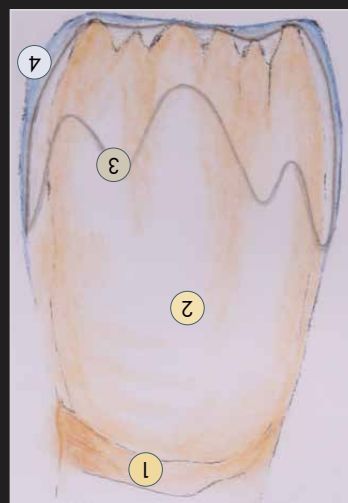

crea.lign  
Stratification  
standard

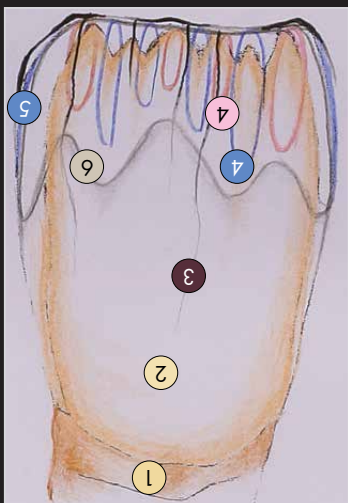

crea.lign  
Stratification  
personnalisée

## Affectation des opaques crea.lign aux teintes dentine

Opaqueur crea.lign	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Gum	Z
Teintes du système	A1 B2	A2	A3	B1/C1/ BL3	C2/C3/ D2/D4	B3 B4	A3,5	A4 C4	D3	Gum	Zircon- liner

## Affectation des Incisives aux teintes dentine

Enamel / A-D Combinaison	BL3	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
E1	X	X					X				X				X		
E2			X	X				X									
E3					X				X	X		X	X			X	X
E4						X								X			

## Contrôle de qualité du revêtement cosmétique

- La boue dentinaire - est-elle encore présente?
- Enlever la boue dentinaire avec crea.lign surface cleaner et à l'aide d'une brosse à dents.
- Après avoir passé les restes de polissage à la vapeur, le revêtement cosmétique présente une haute brillance parfaite.

## Conseils et tours de main

### Peu de place pour le revêtement cosmétique:

- En tant que première couche appliquer le combo.lign de teinte adaptée. Pour les couches suivantes, impérativement protéger combo.lign qui ne doit pas se trouver en surface pour empêcher des décolorations et des dépôts de plaque.

### Patients sensibles (patients souffrant d'allergies):

- Pour assurer une polymérisation à 100% du revêtement cosmétique, veuillez respecter les temps de polymérisation indiqués. Mettre le travail terminé pour 1 heure dans une cocotte à 55°C (une mise sous pression n'est pas nécessaire). Ou bien mettre de l'eau bouillante dans un récipient et y déposer l'ouvrage durant 30 minutes.

bredent  
group0098370F-20240228  
Sous réserve d'erreurs et de modifications