


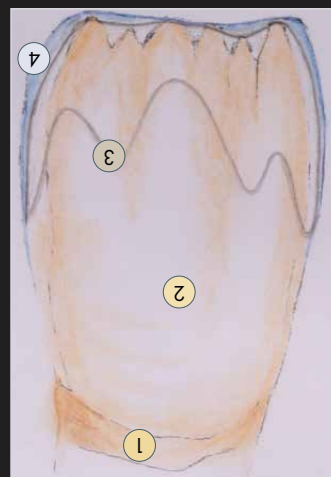


- ① Con la massa dentinale A3,5 o con il Modifier beige - una sfumatura più scura rispetto al colore del corpo del dente - viene realizzata la stratificazione della zona del letto del dente.
- ② Con la massa dentinale A3 viene eseguita la stratificazione del corpo del dente e dei mammelloni.
- ③ Con lo smalto Enamel E2 viene completata la zona incisale.
- ④ Con la massa incisale opal viene completata la forma del bordo incisale.

- ① Con la massa dentinale A3,5 o con il Modifier beige - una sfumatura più scura rispetto al colore del corpo del dente - viene realizzata la stratificazione della zona del colletto del dente.
- ② Con la massa dentinale A3 viene eseguita la stratificazione del corpo del dente e dei mammelloni.
- ③ Con visio.lign color brown vengono riprodotte le fessure sottili dello smalto.
- ④ Sui mammelloni vengono stese, alternandole, le masse incisali blu e rosé.
- ⑤ La massa incisale blu viene applicata sul bordo incisale, nella zona mesiale e distale.
- ⑥ Con lo smalto Enamel E2 viene completata la zona incisale.



**crea.lign**  
Stratificazione  
standard

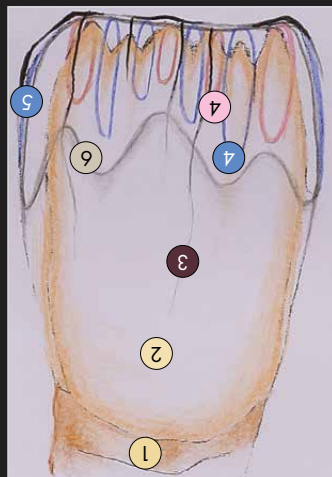

**crea.lign**  
Stratificazione  
individuale

### Classificazione dei colori degli opachi crea.lign e delle masse dentali

Opaco crea.lign	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Gum	Z
Sistema-colori	A1 B2	A2	A3	B1/C1/ BL3	C2/C3/ D2/D4	B3 B4	A3,5	A4 C4	D3	Gum	Zirkon- liner

### Classificazione dei colori degli smalti in combinazione con i colori delle masse dentali

Smalto / Colori A-D Combinazioni	BL3	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
E1	X	X					X				X				X		
E2			X	X				X									
E3					X				X	X		X	X			X	X
E4						X								X			

### Controllo di qualità del rivestimento estetico

- Lo strato di dispersione è ancora presente?
- Rimuovere lo strato di dispersione con crea.lign surface cleaner ed un pennello.
- Dopo aver vaporizzato i residui della lucidatura, il rivestimento estetico deve presentare una lucidatura a specchio.

### Consigli

#### Spazio ridotto per il rivestimento:

- come primo strato applicare combo.lign nel colore più indicato. Con gli strati successivi è assolutamente necessario coprire il combo.lign, che non deve rimanere sulla superficie, onde evitare il rischio di decolorazioni e depositi di placca.

#### Pazienti sensibili (pazienti con allergie):

- per garantire una polimerizzazione completa al 100% del rivestimento, devono essere rispettati i tempi indicati per la polimerizzazione. Mettere il lavoro ultimato o in una pentola pressione per 1 ora a 55° C (pressurizzazione non necessaria) oppure immergerlo in acqua bollente per 30 minuti.



00983701-20240228  
Salvo modifiche ed errori

