



create natural beauty
Estética del rojo y blanco

crea.lign

Composite de revestimiento

Esquema de estratificación para la personalización del ROJO y BLANCO

Esquema de estratificación para crea.lign GUM

1



El hueso representado con el color beige.

2



Con el color lila se consigue la sensación de profundidad.
El lila se arrastra desde el pliegue hasta los dientes.

3



Con el rosa se cubren las capas precedentes.

4



Con pink se destacan los alveolos.

5



Con red se destacan las zonas de intensa irrigación sanguínea.

6



Con transpa se sella toda la superficie.

powered by
visio.lign

bredent
group



create natural beauty
Estética del rojo y blanco

crea.lign

Composite de revestimiento

Esquema de estratificación para la personalización del ROJO y BLANCO

Esquema de estratificación para crea.lign Paste GUM

1



Formar la zona marginal con Paste PO.

2



Construir los alveolos con Paste PL.

3



El tono light se aplica en el borde incisal.

4



Con el color lila se consigue la sensación de profundidad.

Con red se destacan las zonas de intensa irrigación sanguínea.

5



Con transpa se sella toda la superficie.



0094850E-20160411
Salvo error y modificaciones

bredent

bredent