



create natural beauty  
Esthétique rouge-blanc

crea.lign

Composite cosmétique

# Schéma de stratification pour la personnalisation ROUGE-BLANC

Mode d'emploi pour la stratification avec crea.lign GUM

1



Avec le beige on représente les tissus osseux.

2



Avec la teinte lilas on obtient l'effet de profondeur. La teinte lilas est étalée du repli alvéolo-lingual vers les dents.

3



Avec le rose on recouvre les couches précédentes.

4



Avec le pink on souligne les alvéoles.

5



Avec le rouge (red) on souligne les zones à bonne irrigation sanguine.

Light est appliqué le long du liseré gingival.

6



Avec transpa on procède au scellement de toute la surface.

powered by  
visio.lign

bredent  
group



create natural beauty  
Esthétique rouge-blanc

crea.lign

Composite cosmétique

# Esquema de estratificación para la personalización del ROJO y BLANCO

Mode d'emploi pour la stratification avec la pâte crea.lign GUM

1



Avec la pâte PO procéder à la conception de la zone marginale.

2



Avec la pâte PL monter les alvéoles.

3



Avec light appliquer le liseré gingival.

4



Avec lilas on obtient l'effet de profondeur.



Avec le rouge (red) on souligne les zones à bonne irrigation sanguine.

5



Avec transpa on scelle toute la surface.



0094850E-20160411  
Salvo error y modificaciones

bredent

bredent