



create natural beauty
"Красна-белая эстетика"

crea.lign "креа.лайн"

Облицовочный композит

Схема послойного нанесения для индивидуальной ЭСТЕТИКИ ДЕСЕН И ЗУБОВ

Руководство по наслоению crea.lign GUM «креа.лайн ГАМ»

1



Бежевый цвет используется для воспроизведения кости.

2



С помощью лилового цвета достигается эффект глубины. Он распределяется от переходной складки к зубам.

3



Бледно-розовый цвет позволяет смягчить резкость предыдущих слоев.

4



Розовым тоном оттеняют альвеолы.

5



С помощью красного цвета выделяют те участки, которые хорошо снабжаются кровью.

Светлый тон используется в области десневого края.

6



Прозрачный цвет наносится на всю поверхность в качестве завершающего слоя.

powered by
visio.lign
"визио.лайн"

bredent group



create natural beauty
"Красна-белая эстетика"

crea.lign "креа.лайн"

Облицовочный композит

Схема послойного нанесения для индивидуальной ЭСТЕТИКИ ДЕСЕН И ЗУБОВ

Руководство по наслоению пасты crea.lign GUM «креа.лайн ГАМ»

1



Пастой РО формируется пограничный участок.

2



Паста PL используется для воссоздания альвеол.

3



Светлый тон наносится в области десневого края.

4



С помощью лилового цвета достигается эффект глубины.



С помощью красного цвета выделяют те участки, которые хорошо снабжаются кровью.

5



Прозрачный цвет наносится на всю поверхность в качестве завершающего слоя.



009485RU-20160411

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений

bredent

bredent